

# CONDICIONADOR DE PORCELANA 10% by HENRY SCHEIN®

## 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CONDICIONADOR DE PORCELANA 10% é utilizado no condicionamento ácido de porcelanas e peças protéticas com o intuito de facilitar e aprimorar a ancoragem mecânica, obtendo assim uma melhor adesão. O ácido fluorídrico presente na formulação ao entrar em contato com as peças protéticas provê um ataque químico e com isso aumenta a rugosidade e conseqüentemente a área de superfície com o intuito de aprimorar a adesão.

## 2. INDICAÇÃO:

Condicionador de Porcelana 10% é um gel, a base de ácido fluorídrico na concentração de 10%, indicado para o condicionamento ácido de porcelanas com o objetivo de aumentar a adesão à restauração.

## 3. COMPOSIÇÃO:

Água destilada, Carbômero ultragel, Ácido Fluorídrico e Pigmento.

## 4. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Condicionador de Porcelana 10% :

01 seringa contendo 1,4mL; 2,0mL; 2,5,mL; 3,0mL; 3,5mL; ou 4,0mL;

02 pontas aplicadoras

01 Instrução de Uso

## 5. INSTRUÇÕES DE USO:

### Reparo de porcelanas

- 1- Prepare um bisel de 2-3mm de extensão, jatear com óxido de alumínio e lavar com spray de água.
- 2- Faça o ataque ácido na porcelana com o Condicionador de Porcelana por 4-5 minutos, lavar, enxaguar bem e secar completamente.
- 3- Aplique o \*Silano Agente de Ligação de acordo com as instruções de uso.
- 4- Aplique o adesivo e o compósito de acordo com as instruções do fabricante.

### Reparo de porcelana / metal

- 1- Prepare a porcelana (bisel de 2-3mm).
- 2- Jateie com óxido de alumínio o metal e a porcelana, lave com spray de água e seque.
- 3- Aplique o Condicionador ácido fluorídrico somente na superfície da porcelana por 4-5 minutos, lavar enxaguar e secar.
- 4- Aplique o adesivo e o compósito de acordo com as instruções do fabricante.

### Reparo de compósitos híbridos

- 1- Prepare um bisel de 2-3mm, jatear com óxido de alumínio e lavar com água.
- 2- Aplique o Condicionador de Porcelana sobre a restauração, por 60 segundos, lavar com spray de água e secar completamente.
- 3- Aplique o \*Silano Agente de Ligação de acordo com as instruções.
- 4- Aplique o adesivo e o compósito de acordo com as instruções do fabricante.

### Preparo de facetas veneer de porcelana

- 1- Isole a face externa das facetas veneer de porcelana com cera.
  - 2- Aplique o Condicionador de Porcelanas na face interna da faceta veneer de porcelana por 4-5 minutos, lave cuidadosamente com spray de água ou banho ultrassônico e seque.
  - 3- Aplique o \*Silano Agente de Ligação de acordo com as instruções.
  - 4- Proceda a cimentação com um \*cimento resinoso com Flúor, conforme instruções para a cimentação adesiva de facetas veneer de porcelana.
- \*Produtos vendidos separadamente.

## 6. DESINFECÇÃO E CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO:

Não há condições especiais de manipulação, quando o produto é utilizado por um profissional de odontologia de acordo com as instruções de uso. Descartar o produto conforme legislação local vigente.

## **7. PRECAUÇÕES:**

Somente para uso odontológico.

Uso profissional.

Mantenha fora do alcance das crianças.

O uso prolongado pode causar o sobrecondicionamento da peça protética, isto é, o condicionamento excessivo da peça protética, danificando-a.

A utilização de EPI (equipamento de proteção individual) é obrigatória. O Cirurgião Dentista ou auxiliar, durante a sua manipulação, devem portar de: óculos de proteção, gorro, máscara, luvas e um jaleco.

Pode ocorrer resposta alérgica ou queimadura caso entre inadvertidamente em contato com o paciente.

Recomenda-se que o Condicionador de Porcelana 10% seja utilizado com ponta aplicadora plástica do tipo universal descartável (comumente encontrada no mercado). Após o uso do produto, a ponta aplicadora deve ser removida e descartada. A utilização de pontas aplicadoras, que não a recomendada pelo fabricante, é de responsabilidade do profissional.

## **8. RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

Altas temperaturas podem levar a baixa performance e alteração em sua consistência.

Este produto contém ácido fluorídrico, evite o contato com o esmalte, dentina, olhos e pele. -- Caso ocorra contato, lave com água saturada com bicarbonato de sódio. Para olhos e pele, persistindo a irritação, procure assistência médica.

Não há condições especiais de manipulação. Descartar o produto conforme legislações locais.

## **9. CONTRAINDICAÇÕES E EFEITOS ADVERSOS:**

Não há contraindicações quando o produto é utilizado por um profissional de odontologia de acordo com as instruções de uso. Entretanto em pacientes que possuem histórico de alergia a qualquer um dos componentes, recomendamos não fazer uso, ou ainda quando a técnica estipulada não puder ser aplicada.

## **10. VALIDADE:**

Condicionador de Porcelana 10% têm uma validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, mesmo após aberto, desde que mantido em sua embalagem original e mantido sob condições adequadas de armazenamento.

A data de validade, que consta nas embalagens, representa o prazo máximo para utilização do produto.

Não usar após a data de validade.

## **11. ARMAZENAMENTO:**

Manter o produto em sua embalagem original e fechada após o uso.

Armazenar em temperatura de 5°C a 28°C, em local seco, protegido da luz solar direta e do calor.

### **Fabricante e detentor da notificação Anvisa: Vigodent Indústria e Comércio LTDA**

CNPJ: 33.425.331/0001-22 - Indústria Brasileira.

Endereço: Rua Pesqueira, 26 - Bonsucesso

Rio de Janeiro - RJ - Brasil

### **Responsável técnico:**

Catia Mara da Eira Hoehn

CRQ/RJ 03212642 - 3ª região

### **Notificação ANVISA: 10068879077**